


Anleitung zur Probenentnahme mit Trockentupfer beim Verdacht auf SARS-CoV-2



Probenentnahmeset Trockentupfer

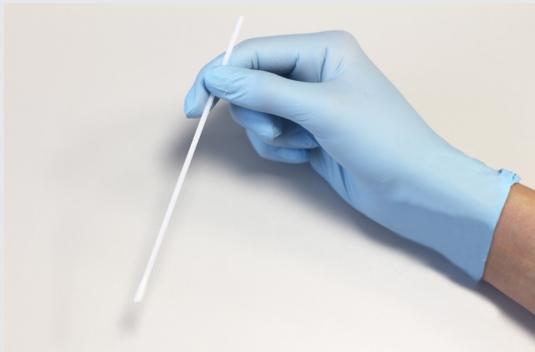

Den Tupfer aus steriler Verpackung entnehmen.



Probe im hinteren Rachenraum durch leichtes Rotieren mit der Tupferspitze entnehmen. D.h. die Probe hinter dem Gaumensegel entnehmen.



Röhrchenkappe abschrauben und den Tupfer bis zur Sollbruchstelle abbrechen.

Vorsicht:
die Sollbruchstelle ist nahe an der Tupferspitze.



Röhrchenkappe wieder auf das Röhrchen setzen und fest zuschrauben. Röhrchen mit Barcodeetikett oder Patientendaten versehen.

Röhrchen sofort an das Labor senden. Wenn der Versand am gleichen Tag nicht möglich ist, bei 2°C – 8°C lagern.